

Stellar M22

by Lumenis

Intense Pulsed Light

with various filters for
every patient

The Lumenis IPL

2001
NatuLight



日本初の
承認機IPL

2013
M22



2021
Stellar M22



M22の
進化機種

更に使いやすく、
患者様個々の状態に
応じてより効果的で、
安全性の高い治療を
実現します

Stellar M22の進化

ハンドピースデザイン



人間工学に基づいたデザインで
持ちやすくなりました
ライトガイドが長くなり、治療域
の視認性が向上しました

タッチスクリーン



スクリーンがより大きくなり、
画面操作がおこないやすくなり
ました

6種類のフィルタ

515nmフィルタが新しく承認されました



515nmフィルタ



560nmフィルタ



590nmフィルタ



615nmフィルタ



640nmフィルタ




695nmフィルタ

AOPTテクノロジー

OPTに加えAOPT機能が加わりました




Optimal Pulse Technology (OPT):

パルスごとに均一なフルエンスで照射できます

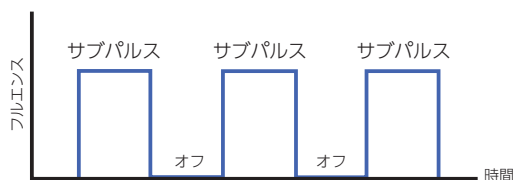

Advanced OPT (AOPT):


サブパルスのフルエンスを個別に設定できます

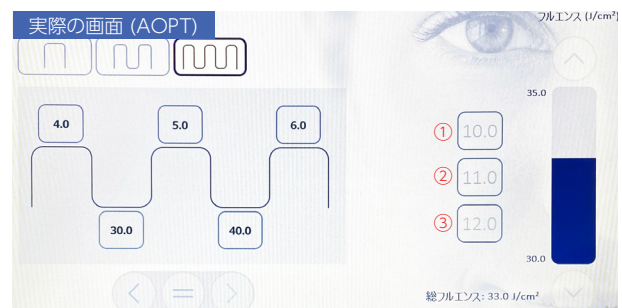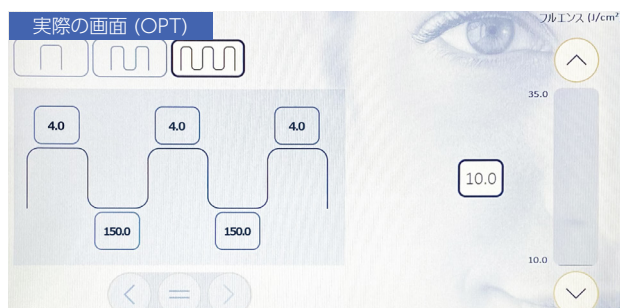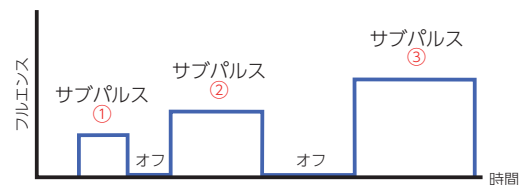

Stellar M22に引き継がれたテクノロジー


Optimal Pulse Technology (OPT)

パルスごとに均一な出力で照射でき、効果的で安全性の高い治療が行えます

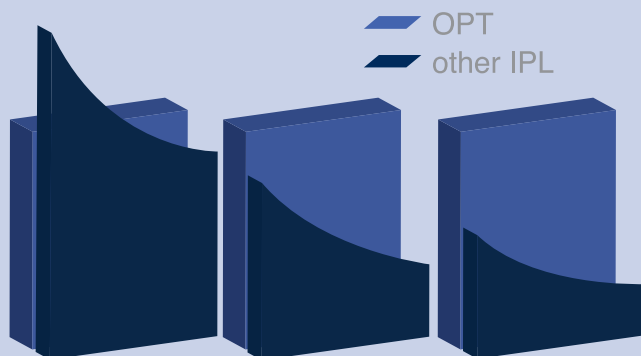


MSP™ Technology (パルス分割)

パルスを分割することで表皮温度の上昇を防ぎ、ターゲットの温度を効率よく上昇させます

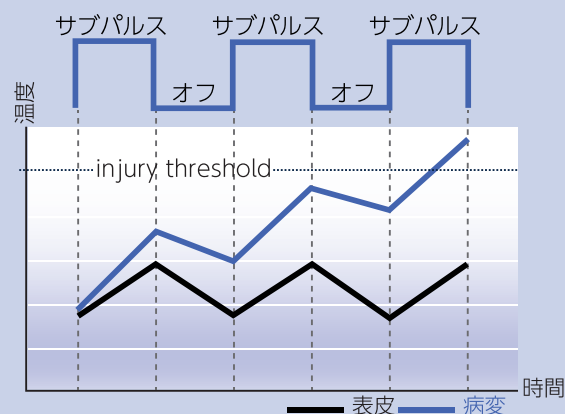


ユニバーサルハンドピースの特徴

Stellar M22はひとつのハンドピースでフィルタの交換によって波長を変えることができます
ライトガイドは施術部位にあわせて交換します

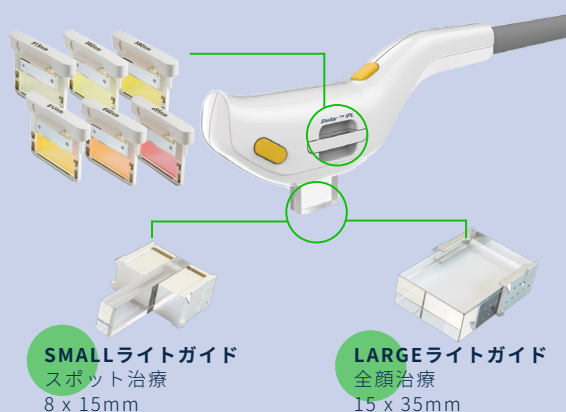

コンタクトクーリングによる表皮保護

コンタクトクーリングにより安全性の向上と照射時の疼痛が緩和します 少量のジェルを塗布し、皮膚に接触させて照射をおこないます

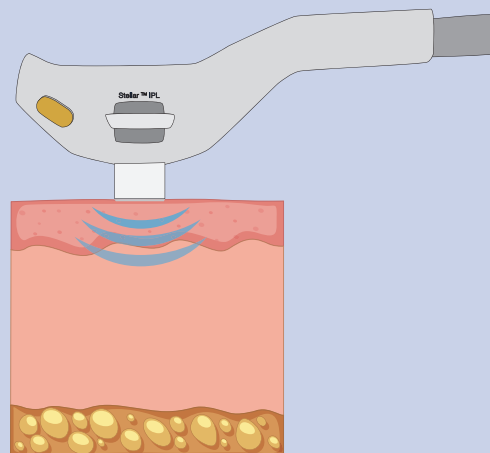


症状に合わせた幅広いカスタマイズ設定

フィルタ (波長)




パルス幅・
パルスディレイ

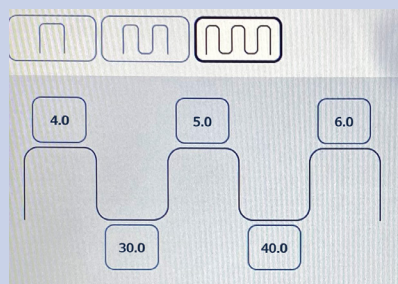


パルスの
分割

フルエンス

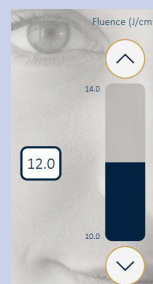

スポット
サイズ

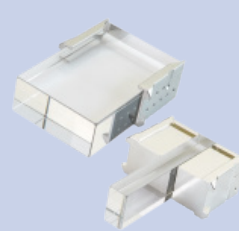

Stellar M22 - Specifications	
一般の名称	キセノン光線治療器
販売名	Stellar M22 IPL モデル
承認番号	30300BZX00035000
波長	515-1200 nm
フィルタ	515, 560, 590, 615, 640, 695 nm
ライトガイド	8 x 15 mm / 15 x 35 mm
エネルギー密度（フルエンス）	10 - 35 J/cm ²
パルスの反復	Single, Double, Triple
パルス幅	4 - 20 ms
パルスディレイ	5 - 150 ms
パルス反復率	Up to 1 Hz
電氣的定格	100VAC ・ 12A ・ 50/60 Hz
寸法	本体：W51 x D56 x H52 cm カート：W60 x D70 x H70 cm
重量	本体：45 kg カート：35 kg



製造販売元 株式会社日本ルミナス

〒140-0014 東京都品川区大井1-14-3 K-3ビル 5F
T 03-4431-8300 | F 03-4431-8301 | LUMENIS.CO.JP/AESTHETICS

オペレーションセンター

大田区平和島6-5-1
TRC C棟C
T 03-4431-8310
F 03-4431-8311

大阪支社

大阪市淀川区宮原4-5-36
ONEST新大阪スクエア2F
T 06-6350-7780
F 06-6350-7781

名古屋営業所

名古屋市中区丸の内3-17-6
ナカトウ丸の内ビル2F
T 052-971-2351
F 052-971-2355

福岡営業所

福岡市博多区榎田1-8-31
榎田ビジネススクエア106
T 092-412-5522
F 092-412-5588

仙台事務所

仙台市青葉区本町1-3-9
第6広瀬ビル8F
T 022-796-8314
F 022-796-8316