



Photofacial®  
フォトフェイシャル®

# Stellar M22

Intense  
Pulsed Light  
with various filters for  
every patient



# The Lumenis IPL



更に使いやすく、患者様個々の状態に応じてより効果的で、安全性の高い治療を実現します

## Stellar M22の進化

### ハンドピースデザイン



人間工学に基づいたデザインで持ちやすくなりました  
ライトガイドが長くなり、治療域の視認性が向上しました

### タッチスクリーン



スクリーンがより大きくなり、画面操作がおこないやすくなりました

### 6種類のフィルタ

515nmフィルタが新しく承認されました




### AOPTテクノロジー

OPTに加えAOPT機能が加わりました




#### Optimal Pulse Technology (OPT):

パルスごとに均一なフルエンスで照射できます

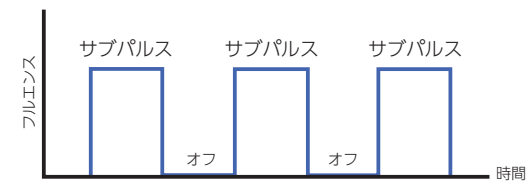

#### Advanced OPT (AOPT):


サブパルスのフルエンスを個別に設定できます

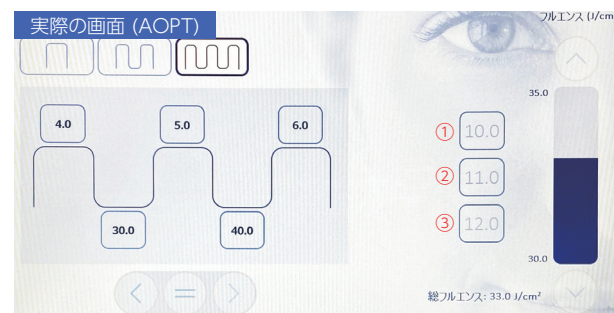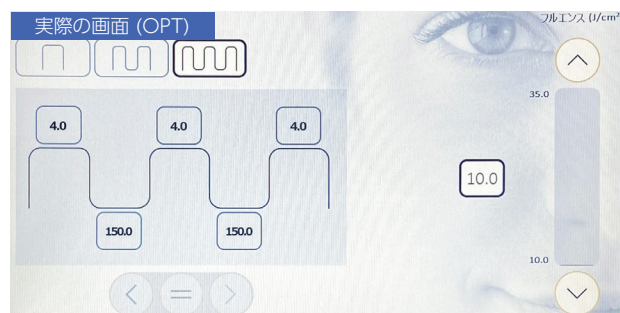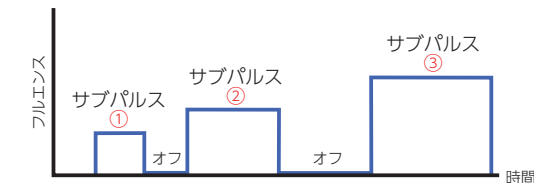

# Stellar M22に引き継がれたテクノロジー


## Optimal Pulse Technology (OPT)

パルスごとに均一な出力で照射でき、効果的で安全性の高い治療が行えます

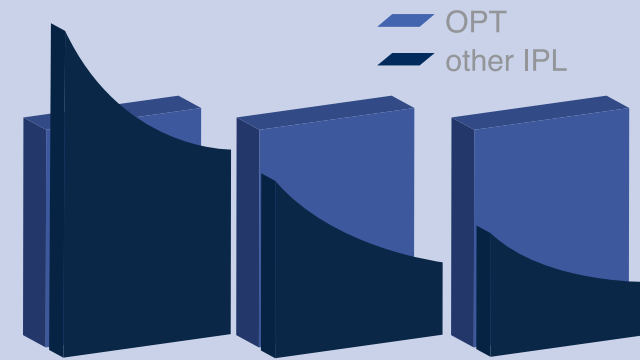


## MSP™ Technology (パルス分割)

パルスを分割することで表皮温度の上昇を防ぎ、ターゲットの温度を効率よく上昇させます

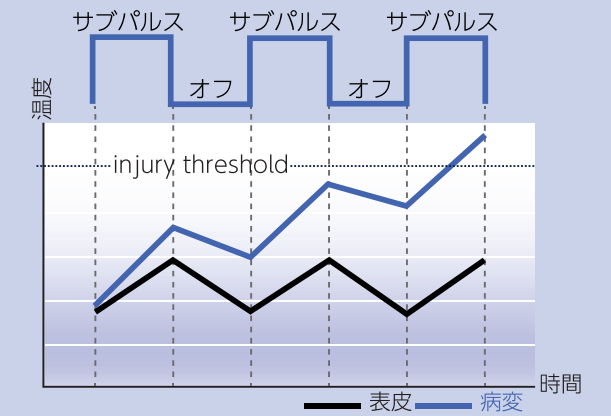


## ユニバーサルハンドピースの特徴

Stellar M22はひとつのハンドピースでフィルタの交換によって波長を変えることができます  
ライトガイドは施術部位にあわせて交換します

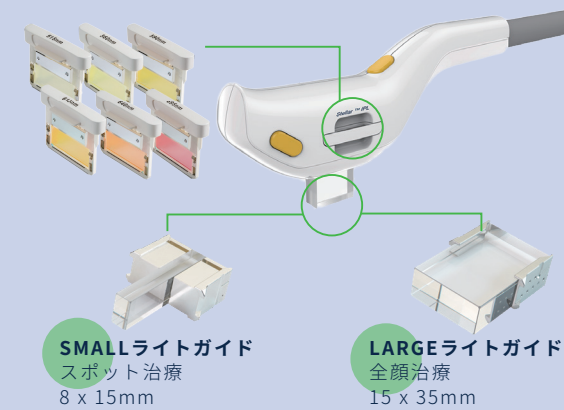


## コンタクトクーリングによる表皮保護

コンタクトクーリングにより安全性の向上と照射時の疼痛が緩和します  
少量のジェルを塗布し、皮膚に接触させて照射をおこないます

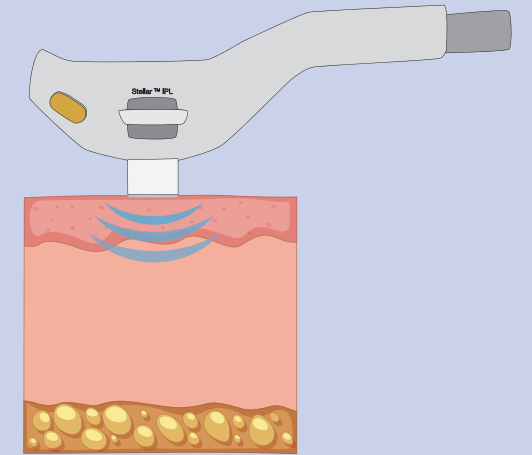

## 症状に合わせた幅広いカスタマイズ設定

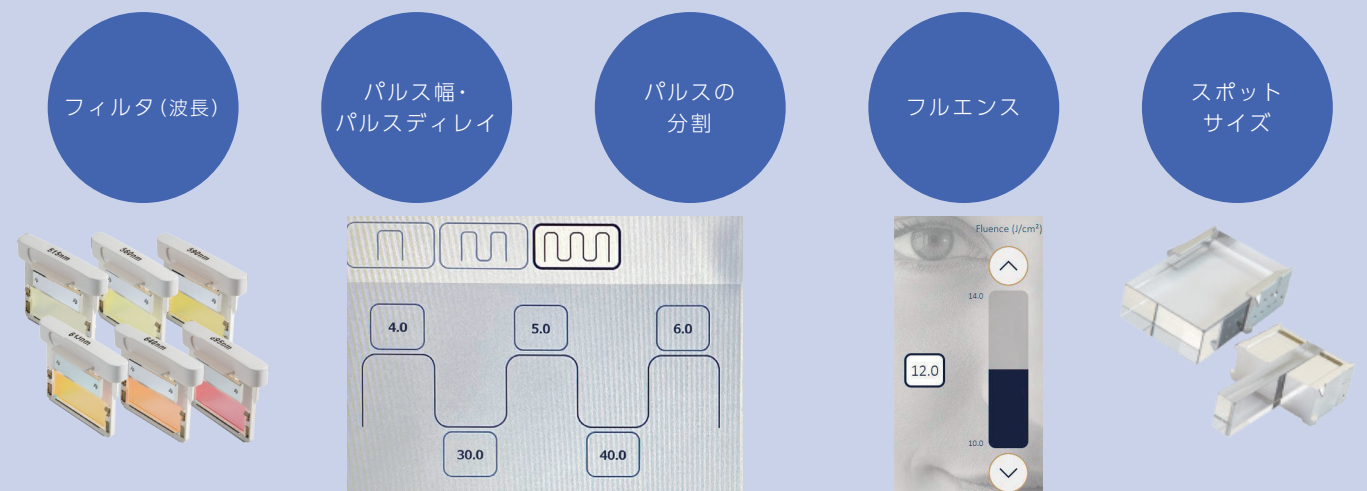

## Stellar M22 - Specifications

|                 |  |
|-----------------|--|
| 一般的名称           | キセノン光線治療器  |
| 販売名             | Stellar M22 IPL モデル                              |
| 承認番号            | 30300BZX00035000                                 |
| 波長              | 515-1200 nm                                      |
| フィルタ            | 515, 560, 590, 615, 640, 695 nm                  |
| ライトガイド          | 8 x 15 mm / 15 x 35 mm                           |
| エネルギー密度 (フルエンス) | 10 - 35 J/cm <sup>2</sup>                        |
| パルスの反復          | Single, Double, Triple                           |
| パルス幅            | 4 - 20 ms  |
| パルスディレイ         | 5 - 150 ms                                       |
| パルス反復率          | Up to 1 Hz                                       |
| 電氣的定格           | 100VAC · 12A · 50/60 Hz                          |
| 寸法              | 本体 : W51 x D56 x H52 cm カート : W60 x D70 x H70 cm |
| 重量              | 本体 : 45 kg カート : 35 kg                           |



製造販売業者

## ルミナス・ビー・ジャパン株式会社

〒106-6117 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー17階 TEL(03)4535-1466 FAX(03)4535-1465  
<https://lumenis.co.jp/contact/>

オペレーションセンター 〒136-0075 東京都江東区新砂2-3-15 日本通運新砂6号倉庫3階 TEL(03)4535-1467 FAX(03)4535-1468  
大阪支社 〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町3-2-13 平野町中央ビル6階 TEL(06)6231-1210 FAX(06)6231-1220  
名古屋営業所 〒456-0072 愛知県名古屋市熱田区川並町4-7 Rビル303 TEL(052)681-0605 FAX(03)4535-1465  
福岡営業所 〒816-0921 福岡県大野城市仲畑1-35-19 オフィスパレア仲畑Ⅲ 1号室 TEL(092)593-2286 FAX(03)4535-1465